



01 DESCRIPCIÓN

Camilla de alta resistencia diseñada para el transporte e inmovilización en situaciones de evacuación, primeros auxilios y rescate. Su resistencia está contenida en su estructura y diseño de forma corporal que la hace más practica cuando se requiere transportar personas afectadas por zonas estrechas y/o de difícil acceso.

02 MATERIAL

- Material: Plástico reforzado



Técnica de Fabricación

Inyección de una
sola pieza

18 agarraderas
y de superficie
antideslizante.

La inmovilización es
lograda por
3 correas de nylon
de 2" con hebillas
clic clac, que sujetan
los brazos, pecho y
las piernas.

☎ 947 594 779
☎ 991 322 768

Av. Hubert Lanssier
Mz. C Lt. 37, Luriganchu
Lima, Perú



03 DISEÑO & CARACTERÍSTICAS

- Facilita el **traslado seguro** del paciente.
- **Diseño Ergonómico** de fácil manejo y limpieza.
- **Impermeable** a fluidos corporales y flota en el agua.
- Posee asas de sujeción distribuidas al entorno de la camilla para mayor **facilidad de transporte**.
- **Es compatible** con la mayoría de los dispositivos de inmovilización de cabeza y mecanismos de correa.
- Su estructura **permite el paso de rayos X**, debido a que es completamente translúcida.

04 MODELO & PRESENTACIÓN

- **Modelo:** Camilla de Rescate
- **Color:** Naranja
- **Presentación:** Bolsa
- **Contiene:**
 - 1 camilla rígida
 - 3 correas de seguridad

Producto
Importado



05 APLICACIONES

Se utiliza principalmente en hospitales, deportes, ambulancias, centros de trabajo y en todo lugar donde exista riesgo de producirse un accidente para transportar personas heridas.



INDUSTRIAS
RHINO

FICHA TÉCNICA

**CAMILLA
DE PVC**



06 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


ESPECIFICACIÓN	MEDIDAS
• Largo	183 cm
• Ancho	46 cm
• Grosor	6 cm
• Peso	7 Kg
• Soporta carga	170 kg

07 COMO USAR LA CAMILLA




1

Posicione al paciente cuidadosamente.

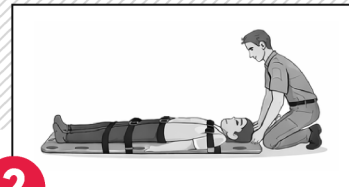


2

Asegure bien con las 3 correas.

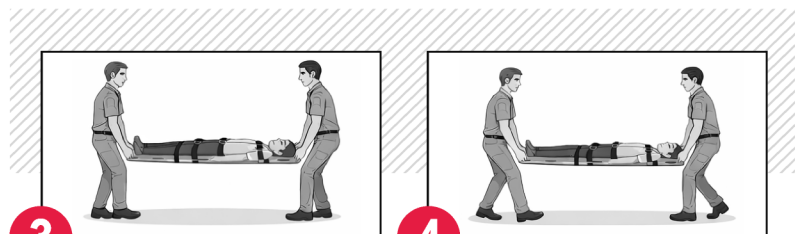

3

Levante con ayuda del personal capacitado.

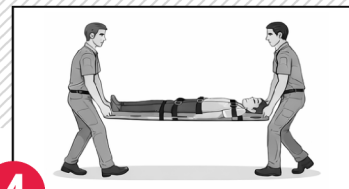

4

Traslade al punto de atención.

☎ 947 594 779

☎ 991 322 768

Av. Hubert Lanssier
Mz. C Lt. 37, Lurigancho
Lima, Perú